

**HOFFMANN'S
ZINKOXID
EUGENOL**



REF 8001002



Made in Germany

Hergestellt von/ manufactured by

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH

Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin, Germany
Tel: +49 30 820099-0
Fax: +49 30 8228145
quality@hoffmann-dental.com
www.hoffmann-dental.com

Stand der Information: 06/2026

Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt

Zusammensetzung:

Pulver enthält: Zinkoxid (Ph. Eur.)

Flüssigkeit enthält: Eugenol (echtes Nelkenöl, Ph.Eur.)

Packungsgrößen:

Pulver: 30 g

Flüssigkeit: 15 ml

Besondere Hinweise:

- auf pulpanahes Dentin oder auf die eröffnete Pulpa nicht applizieren.
- nicht unter Komposite-Füllungen einsetzen
- nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Hinweise für Allergiker:

Hoffmann's Eugenol bei bekannter Allergie auf

Eugenol nicht anwenden.

Sicherheitshinweise:

- Gefäße verschlossen halten und nach der Entnahme sofort wieder verschließen.
- vor Sonne schützen

**HOFFMANN'S
ZINKOXID
EUGENOL**



REF 8001002



Made in Germany

Hergestellt von/ manufactured by

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH

Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin, Germany
Tel: +49 30 820099-0
Fax: +49 30 8228145
quality@hoffmann-dental.com
www.hoffmann-dental.com

Status of the Information: 06/2026

Instruction for use for the dentist

Composition:

Powder contains: zinc oxide (Ph. Eur.)

Liquid contains: eugenol (real clove oil, Ph.Eur.)

Package Size:

Powder: 30 g

Liquid: 15 ml

Special information:

- Do not apply on opened pulp or near-pulp areas
- Do not use under composite filling
- Do not use after the expiration date.

Information for people with allergies:

Do not use Hoffmann's Eugenol in case of a known eugenol allergy.

Safety instruction:

- Keep containers closed and always close immediately after use.
- Protect from the sun